

URIVET50

L'analyse d'urine complète à la clinique

Bandelettes réactives semi-quantitatives 11 paramètres



Résultats en
60-120 sec.



Fiable et
rapide



Stockage à
temp. ambiante



Multi-espèces



Bilirubine

Corps
cétoniques

Densité

Glucose

Leucocytes

Créatinine

Micro-
albumine

Nitrites

pH

Protéines

Sang

Ratio Protéines/
Créatinine

Ratio Microalbu-
mine/Créatinine

Procédure d'utilisation

URIVET 50

Reagent strips for urinalysis
Bandelettes réactives pour analyse d'urine
Test reactivos para análisis de orina
Reagenzien strips für Urinanalyse

Glucose/Glucose
Bilirubin/Bilirubine
Bilirubin
Ketones/Cétones
Cetones/Ketonkörper
S.G/Densité
Densité/Dichte
Bilirubin
Sang/Blut
pH
Protein/Protéines
Protéines
Microalbumin/Microalbumin
Microalbumin
Creatinin / Créatinine
Créatinine
Nitrites/Nitrites
Nitrites
Leukocytes/Leucocytes
Leucocytes/Leukozyten

Kitvia SAS
16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD
www.kitvia.com

1. Immerger la bandelette dans l'urine pendant 1 seconde
2. Éliminer l'excès d'urine en passant la tranche de la bandelette sur le rebord du récipient et en essuyant le dos de la bandelette sur un papier absorbant
3. Lire les résultats après 60 secondes (sauf Leucocytes en 120 secondes) en comparant les variations de couleurs obtenues avec les différentes échelles de couleurs.

Référence	Désignation	Condit.
D2VET11AC	Bandelettes URIVET50	1x50
D2URIDCTORVET	Lecteur URIREADER	1x1

KITVIA SAS

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com